



LifePad®
01 02 085



LifePad®
Set*
0102155

*Set bestehend aus LifePad®,
Kleiderschere, Beatmungstuch
BT-DRY und Einmal-Handschuhen,
inkl. Wandhalterung

VORTEILE DES LifePad®

Schritt-für-Schritt-Anleitung zur Reanimation

Einfache Anwendung,
keine Vorkenntnisse notwendig

Visuelles und akustisches Feedbacksystem

Für optimale Kompressionstiefe
und Druckfrequenz

Kompakte Größe

Im DIN A5 Format (21×16 cm)
in jeder Tasche gut verstaubar

Flexibles Material

Passt sich der Körperform an

Einfache Positionierung

Anleitung und Markierung direkt
auf dem Pad

In Kooperation mit der
Björn Steiger Stiftung



WIR HELFEN LEBEN RETTEN



W.Söhngen GmbH

Platter Straße 84

D-65232 Taunusstein

Fon +49 (0) 6128 873 - 0

Fax +49 (0) 6128 840 84

Mail info@soehngen.com

Web www.soehngen.com


© W.Söhngen GmbH • Produktdarstellung und Gestaltung alle Rechte
bei W.Söhngen GmbH • Nachdruck, auch auszugsweise, nur mit Ge-
nehmigung der W.Söhngen GmbH. Abbildungen können abweichen.
Es gelten die Allgemeinen Geschäftsbedingungen der W.Söhngen
GmbH. www.soehngen.com/agb

Stand: 02-2023

Folge dem RHYTHMUS!

WAS MACHT DAS LifePad® AUS?

Sollte der Ernstfall eintreten, sind viele Ersthelfer zunächst überfordert. Das LifePad® leitet Sie bei der Reanimation an und hilft Ihnen, die richtigen Schritte sicher durchzuführen.

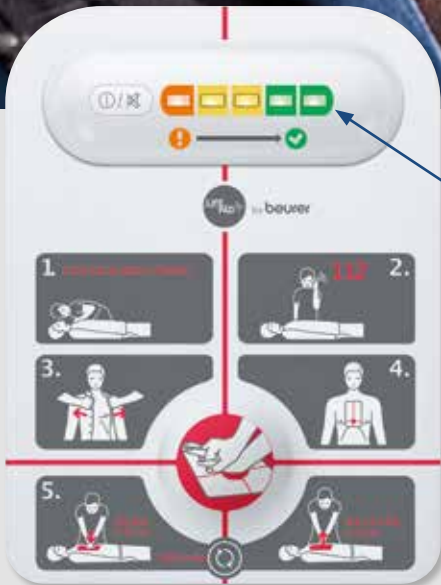

Visuelles und akustisches Feedbacksystem

Die Schritt-für-Schritt-Anleitung hilft Ihnen, einen kühlen Kopf zu bewahren. Durch die farbigen LED's erhalten Sie visuelles Feedback für den optimalen Kompressionsdruck.

Ein akustisches Signal gibt Ihnen die optimale Kompressionsfrequenz von 100 Schlägen pro Minute vor.

Einfache Anwendung

Durch das flexible Material passt sich das LifePad® jeder Körperform an und kann bei Personen ab 12 Jahren angewendet werden.

Die Auflagefläche zeigt die genaue Positionierung der Hände für die Reanimation.

Das Gerät kann auch in Kombination mit einem Defibrillator verwendet werden (Signalton dafür abschaltbar).

Praktisch: das LifePad® ist immer dabei.



Kompakte Größe

Die häufigsten Anwendungsfälle



Auf der Arbeit



In der Freizeit



Im Straßenverkehr

Ein Herzstillstand kann jeden treffen – meistens unerwartet

Mit dem LifePad® kann sofort geholfen werden

Das menschliche Gehirn kann bei einem Herz-Kreislauf-Stillstand höchstens fünf Minuten ohne Sauerstoff überleben, wobei mit jeder Minute die Wahrscheinlichkeit für schwerwiegende Folgen steigt.

Nicht einmal bei der Hälfte der Herz-

stillstände in Deutschland führen Ersthelfer die lebensrettenden Handgriffe aus.

Wenn mehr Menschen unverzüglich handeln würden, könnten sich die Überlebenschancen der Betroffenen um ein Vielfaches erhöhen.